

The Alere logo, consisting of the word "Alere" in white sans-serif font on a dark purple square background with a rounded top-left corner.

Alere™



TESTES RÁPIDOS

Doenças infecciosas
em cães e gatos



Características



Resultado em até 20 minutos



Armazenamento ambiente ou refrigerado, 2 a 30°C¹



Sem interferência vacinal²



Registrados no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)



Tecnologia: IMUNOCROMATOGRAFIA



Fácil, portátil e conveniente



Apresentações: caixas com 5 ou 10 testes

1. Exceto Giardia Ag Test Kit (2 a 8°C).

2. Exceto Cinomose Ac Test Kit;

Testes disponíveis

CÃES:

Leishmaniose

Detecção dos anticorpos anti-*Leishmania infantum* em amostras de sangue, soro ou plasma

Erliquiose

Detecção dos anticorpos anti-*Ehrlichia canis* em amostras de sangue, soro ou plasma

Dirofilariose

Detecção de antígeno da *Dirofilaria immitis* em amostras de sangue, soro ou plasma

Brucelose

Detecção dos anticorpos anti-*Brucella canis*, em amostras de sangue, soro ou plasma

Cinomose - antígeno (Ag)

Detecção de antígeno do Vírus da Cinomose em amostras de mucosa ocular, saliva, mucosa nasal, urina, soro ou plasma

Cinomose - anticorpo (Ac)

Detecção dos anticorpos contra o Vírus da Cinomose em amostras de sangue, soro ou plasma

Parvovirose

Detecção de antígeno do Parvovírus Canino em amostras de fezes ou swab retal

Parvovirose e Coronavirose

Detecção simultânea de antígenos do Parvovírus Canino e do Coronavírus Canino em amostras de fezes ou swab retal

Giardiase

Detecção de antígeno da *Giardia lamblia* em amostras de fezes

GATOS:

FIV e FeLV

Detecção simultânea dos anticorpos contra o Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e antígeno do Vírus da Leucemia Felina (FeLV) no sangue, soro ou plasma

Giardiase

Detecção de antígeno da *Giardia lamblia* em amostras de fezes



Leishmaniose Ac Test Kit

Detecção dos anticorpos anti-*Leishmania infantum* (Leishmaniose Visceral Canina)

Para uso em cães




Registro MAPA: 9.850/2014


Sensibilidade	Especificidade
97,2%	99,8%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

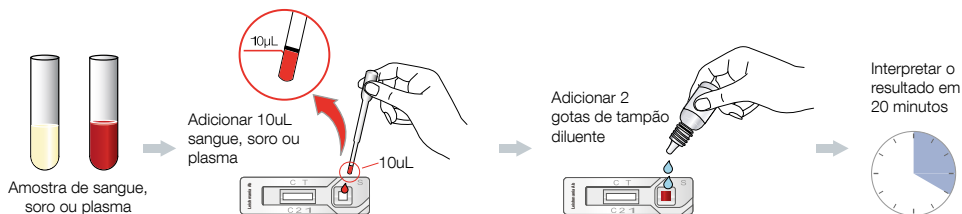


Interpretação

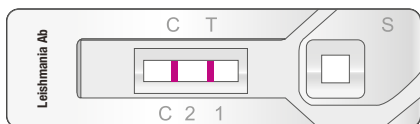

Resultado reagente

Duas linhas coradas (C e T)

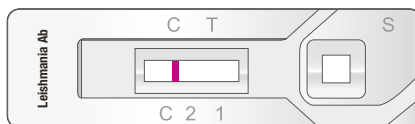

Resultado não reagente

Somente a linha (C) corada

Erliquiose Ac Test Kit

Deteção dos anticorpos (IgM e IgG) anti-*Ehrlichia canis*


Para uso em cães




Sensibilidade	Especificidade
98,2%	100%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

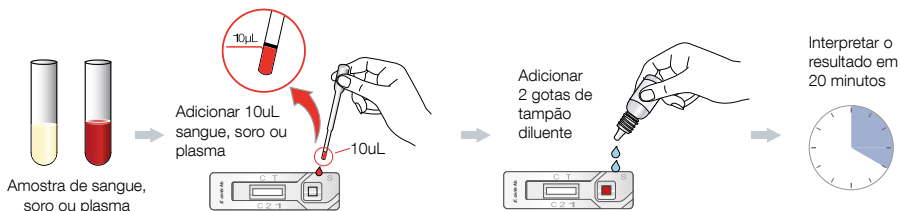


Interpretação

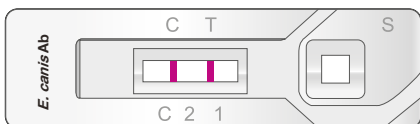

Resultado reagente

Duas linhas coradas (C e T)

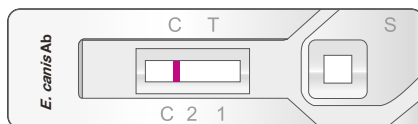

Resultado não reagente

Somente a linha (C) corada

Dirofilariose Ag Test Kit

Deteção de antígeno da *Dirofilaria immitis*

Para uso em cães



Registro MAPA: 9.398/2008

Sensibilidade


98,6%

Especificidade


100%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

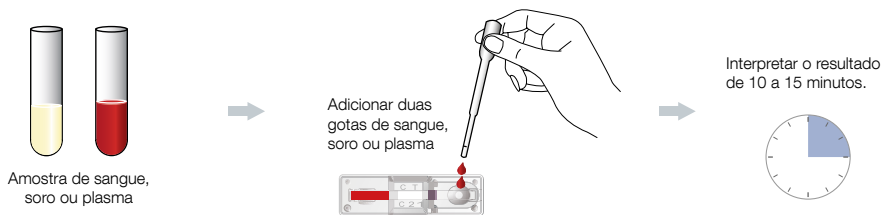


Interpretação

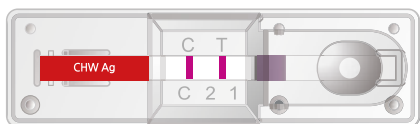

Resultado reagente

Duas linhas coradas (C e T)

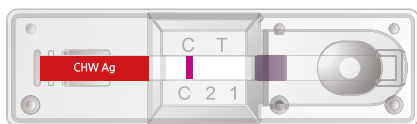

Resultado não reagente

Somente a linha (C) corada

Brucelose Ac Test Kit

Deteção dos anticorpos anti-*Brucella canis*

Para uso em cães




Registro MAPA: 9.509/2009


Sensibilidade	Especificidade
90%	90,1%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

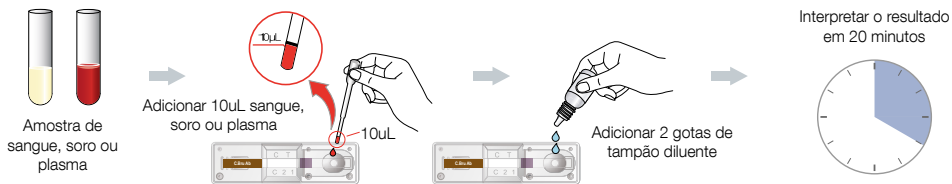


Interpretação

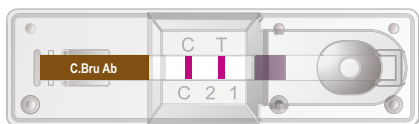

Resultado reagente

Duas linhas coradas (C e T)

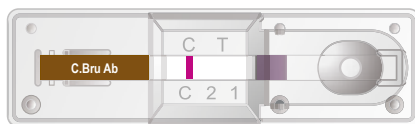

Resultado não reagente

Somente a linha (C) corada

Cinomose Ag Test Kit

Detecção de antígeno do Vírus da Cinomose

Para uso em cães



Registro MAPA: 9.255/2006

Sensibilidade


98,8%

Especificidade


97,7%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

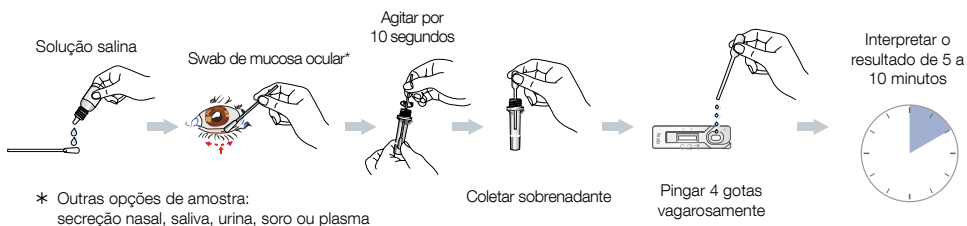


Interpretação

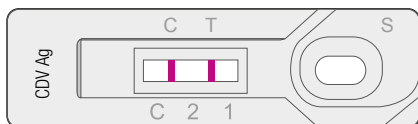

Resultado reagente

Duas linhas coradas (C e T)

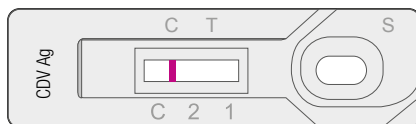

Resultado não reagente

Somente a linha (C) corada

Cinomose Ac Test Kit

Detecção dos anticorpos contra o Vírus da Cinomose

Para uso em cães



Registro MAPA: 9.503/2009

Sensibilidade


100%

Especificidade

100%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

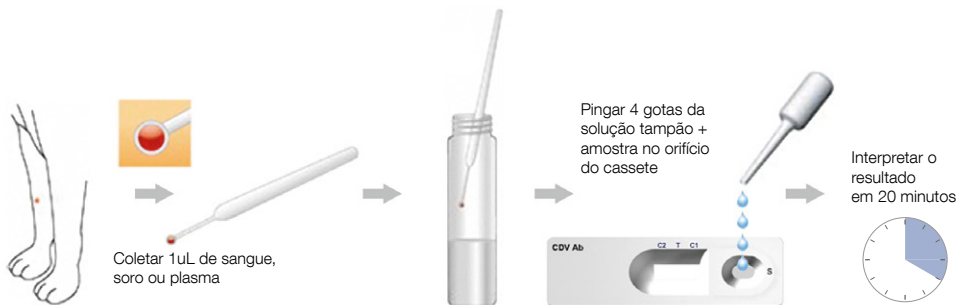

Interpretação

Alta Titulação



Linha T de intensidade maior do que as Linhas C1 e C2. Indica alta concentração do anticorpo contra o Vírus da Cinomose (acima de 1:128 - soroneutralização)

Média Titulação



Linha T de intensidade maior do que a Linha C1 e menor do que a linha C2. Indica concentração média de anticorpo contra o Vírus da Cinomose (de 1:16 a 1:64 - soroneutralização)

Baixa Titulação



Linha T de intensidade menor do que as Linhas C1 e C2. Indica baixa concentração do anticorpo contra o Vírus da Cinomose - (abaixo de 1:16 - soroneutralização)

Não Reagente



Presença das Linhas Controle (C1 e C2) e ausência da Linha T na Janela. Indica ausência de anticorpos contra o Vírus da Cinomose.

Ensaio

Imunocromatográficos

Conveniência e
facilidade de uso
para consultórios,
clínicas, hospitais
e laboratórios
veterinários.



Parvovirose Ag Test Kit

Detecção de antígeno do Parvovírus Canino


Para uso em cães




Sensibilidade	Especificidade
100%	98,8%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

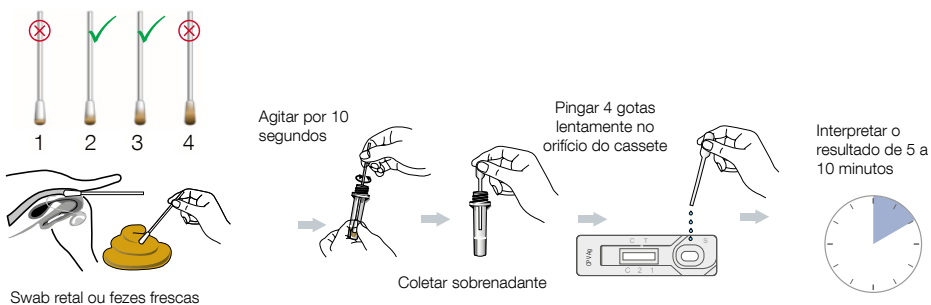


Interpretação

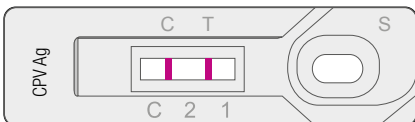

Resultado reagente

Duas linhas coradas (C e T)

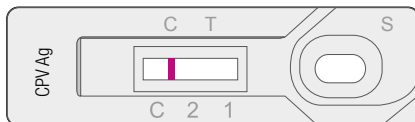

Resultado não reagente

Somente a linha (C) corada

Parvo/Corona Ag Test Kit

Deteção simultânea de antígenos do Parvovírus Canino e do Coronavírus Canino

Para uso em cães




Registro MAPA: 9.510/2009


	Sensibilidade	Especificidade
Parvovirose	100%	100%
Coronavirose	93,1%	97,5%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.


Procedimento

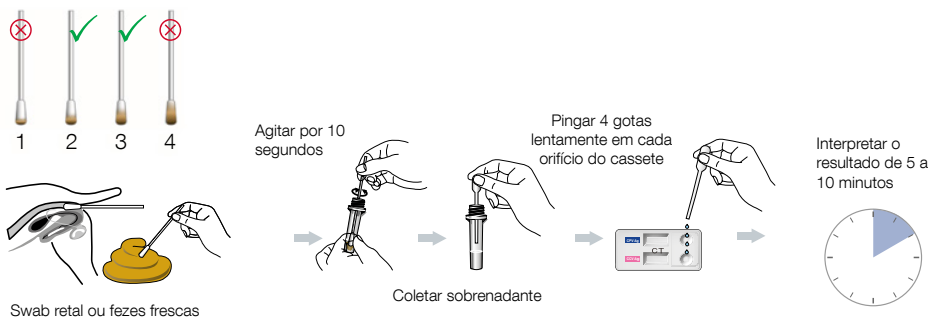


Interpretação

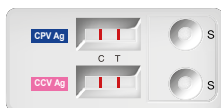


Resultado REAGENTE para Parvovirose e Coronavirose

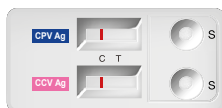

Resultado NÃO REAGENTE para Parvovirose e Coronavirose

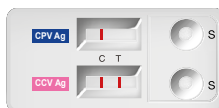

Resultado NÃO REAGENTE para Parvovirose
Resultado REAGENTE para Coronavirose

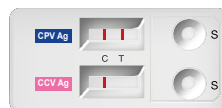

Resultado REAGENTE para Parvovirose
Resultado NÃO REAGENTE para Coronavirose

Giardia Ag Test Kit

Detecção de antígeno da *Giardia lamblia*

Para uso em cães e gatos




Registro MAPA: 9.850/2014


Sensibilidade	Especificidade
100%	100%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Procedimento

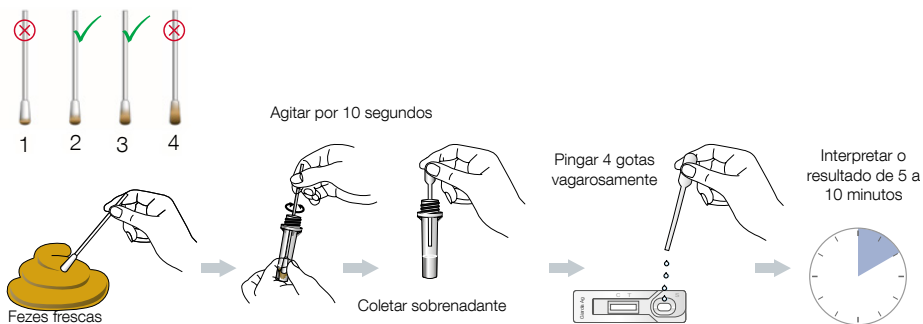


Interpretação

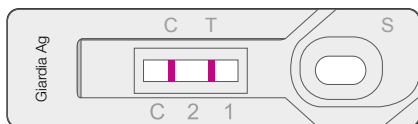

Resultado reagente

Duas linhas coradas (C e T)

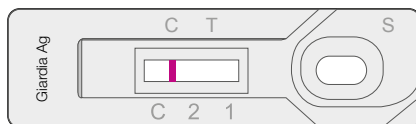

Resultado não reagente

Somente a linha (C) corada

FIV Ac/FeLV Ag Test Kit

Deteção simultânea dos anticorpos contra o Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e antígeno do Vírus da Leucemia Felina (FeLV)

Para uso em gatos




Registro MAPA: 9.691/2012


	Sensibilidade	Especificidade
FIV	96%	98%
FeLV	100%	100%

Valores baseados nos testes protocolados no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.


Procedimento

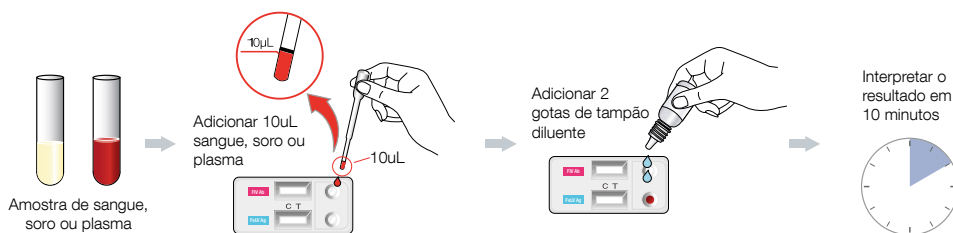

Interpretação

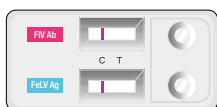


Resultado NÃO REAGENTE para FIV e FeLV

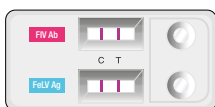

Resultado REAGENTE para FIV e FeLV



Resultado REAGENTE para FIV
Resultado NÃO REAGENTE para FeLV

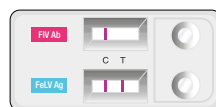

Resultado NÃO REAGENTE para FIV
Resultado REAGENTE para FeLV



Diagnóstico Veterinário

0800 11 32 62

veterinaria.br@alere.com | alerevet.com.br

© 2019 Alere. Todos os direitos reservados. As marcas comerciais referidas pertencem aos seus respectivos donos. As fotos destinam-se apenas a fins ilustrativos, qualquer pessoa retratada nas fotos é um modelo. Uso exclusivo veterinário.